

## Gebruikersinstructies voor de Autolet Impression

De Autolet Impression is een geavanceerde prikpen, die een maximum aan comfort en controle biedt bij het verkrijgen van een bloedmonster.

Met unieke, gepatenteerde Comfort Zone Technology®, verhoogt de Autolet Impression het comfort van het prikken door het verminderen van de pijn naar een meer comfortabele methode voor het verkrijgen van een bloedmonster.


Lees deze instructies zorgvuldig bij het eerste gebruik van de Autolet Impression en bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

### Belangrijk! Zorg voor warme, droge handen.

#### Stap 1:


Zet duim en wijsvinger op het middelste witte gedeelte en draai de kop van de prikpen door de witte ring een kwartslag te draaien. Let op: draai niet aan de ring voor het instellen van de prikdiepte (blauwe gedeelte).

Plaats het lancet in het kokertje van de prikpen, houd het lancet vast en draai het beschermkapje van het naaldje. (fig. 1).

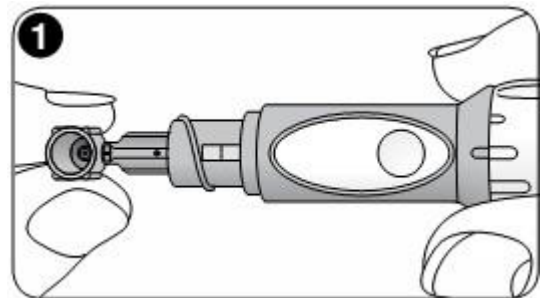


#### Stap 2:

Draai de kop weer op de prikpen. (fig. 2).

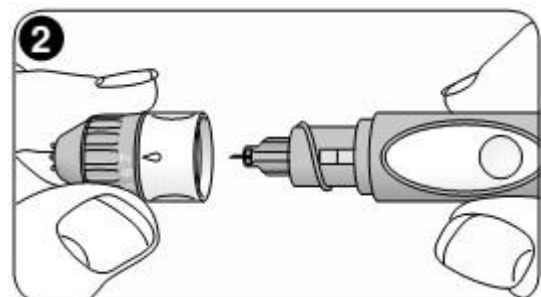


**Stap 3:**


Stel de prikdiepte in. De prikdiepte kan op 7 standen worden ingesteld en kan hierdoor aan ieder individueel huidtype worden aangepast. Wij kunnen niet bij voorbaat zeggen welke diepte u moet gebruiken, dit hangt nauw samen met uw huiddikte. U zult zelf uit moeten proberen welke diepte voor u het meest geschikt is. We raden u aan om met de hoogste instelling te beginnen. Het is belangrijk dat u een mooie grote druppel krijgt en dat u niet teveel moet duwen op de vinger om die druppel te verkrijgen. (fig. 3).

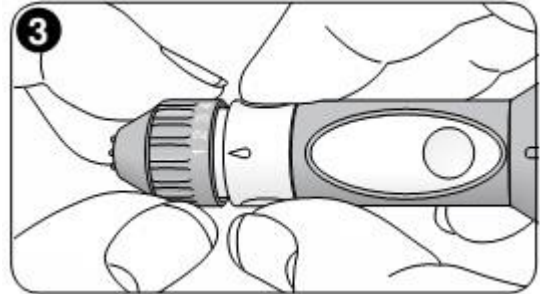**Stap 4:**


Om de prikpen te spannen trekt u het gedeelte naar achteren waar "Autolet Impression" op staat, zodat een klik hoorbaar is. De pen is nu aangespannen. (fig. 4).

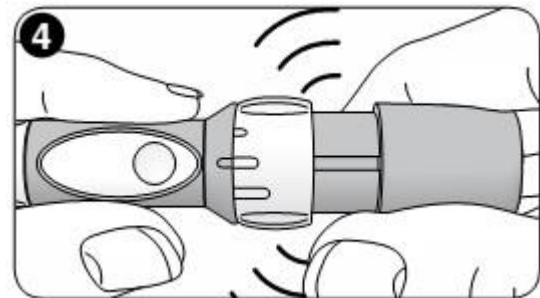**Stap 5:**

Indien gewenst kunt u de kracht van de veer veranderen. Draai met de achterste witte ring en maak een keuze uit de 3 standen: I, II of III. Het kortste streepje staat voor minimale veerkracht. Het langste streepje voor maximale veerkracht. (fig. 5).

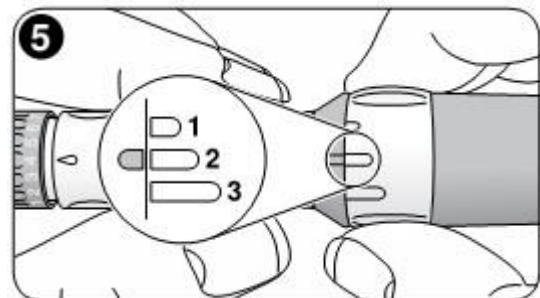**Stap 6:**

Neem de prikpen met de duim en wijs of middelvinger in de hand en druk de prikpen stevig tegen de vingertop. Voor het uitvoeren van de vingerprik drukt u met de vinger op de witte prikknop. (fig. 6).

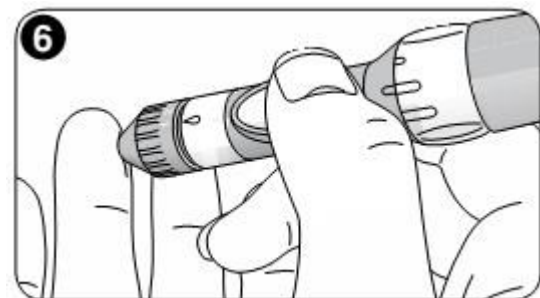

**Stap 7:**

Om het lancet te verwijderen draait u de kop van de prikpen en verwijdert u voorzichtig het naaldje. Gooi het lancet beschermd weg (fig. 7).

